




Техника за обработка на свързващ елемент на сменяема протеза Locator®

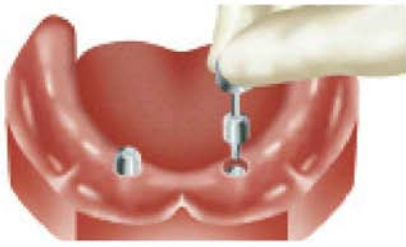


1. Махнете оздравителните компоненти от имплантите с 1,25mmD шестограм.

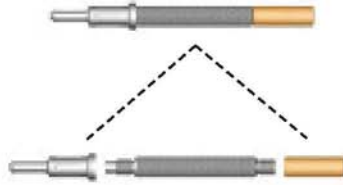

2. Инструментът се състои от три части:
1) Инструмент за отстраняване на мъжкия компонент
2) Инструмент за поставяне на мъжкия компонент
3) Водач за абатмънта *Locator*

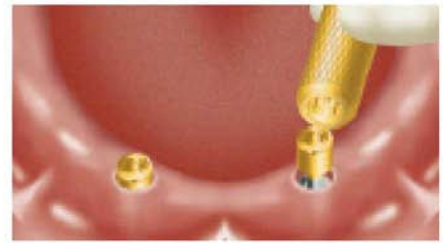


3. Поставете абатмънта *Locator* в имплантата и завъртете на място, като използвате водача на абатмънта. Измерете дълбочината на тъканта на 3 или 4 места. Изберете височина на маншета на абатмънта, която в най-голяма степен се равнява на измерването на тъканта.

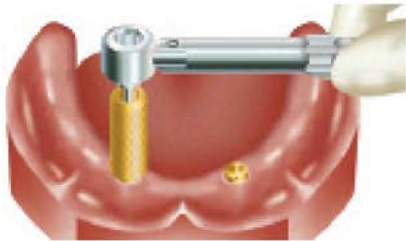

4. Поставете 1,25mmD шестограм в задния край на водача на абатмънта. Приложете най-малко 20 Ncm въртящ момент с калибриран динамометричен ключ. Като алтернатива, използвайте водач на динамометричния ключ (LOCTW15) с динамометричен ключ за затягане на абатмънта.



5. Прикрепете паралелни постове към абатмънтите, за да се определите степента на разминаване. Ако разминаването е по-малко от 10° използвайте прозрачен, розов или син мъжки *Locator*. Ако ъгълът е по-голям от 10° използвайте разширен обхват мъжки локатор (зелен или червен).

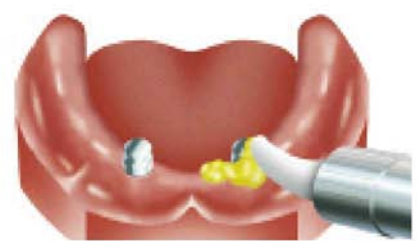

6а. Поставете кепе за отпечатък *Locator* върху абатмънта. Инжектирайте леко течлив отпечатъчен материал около трансферите и вземете отпечатък с цяла лъжица със стандартен отпечатъчен материал.

Техника за вземане на отпечатък с кепе за отпечатък



Техника за коригиране с капаче за обработка




Аналог на абатмънта



6б. Алтернативна техника е да се използва протезата на пациента в комбинация с капачето с черен мъжки елемент за обработка за корекция на отпечатъка.

7. Техника за трансфер: Поставете аналозите на мъжкия компонент *Locator* в кепетата за вземане на отпечатък, разположени в отпечатъчния материал.
Техника за коригиране: Прикрепете аналога в капачето, преди да вкарате слобката в отпечатъка.


8. Лабораторията изработва работната отливка. Поставете белия запълващ разделител върху главата на аналога на абатмънта *Locator*. Закрепете капачето с черен мъжки елемент за обработка. Обработете протезата, като следвате стандартните процедури.

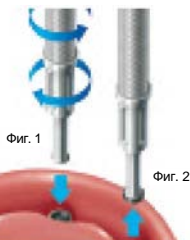

9. Разхлабете накрайника на инструмента за отстраняване на мъжкия компонент *Locator* пълни два оборота обратно на часовниковата стрелка и поставете накрайника в капачето/мъжката слобка и натиснете напред (фиг. 1). Острият край на накрайника ще захване найлоновия мъжки елемент и ще Ви позволи да го извадите. Затегнете накрайника по часовниковата стрелка в основния инструмент, за да освободите коректора (фиг. 2).



10. Използвайте инструмента за поставяне на мъжкия компонент *Locator* за да натиснете здраво заместителя на мъжкия елемент *Locator* в празното метално капаче, намиращо се на протезата. Мъжкният елемент трябва да преминава плавно в ръба на металното капаче.

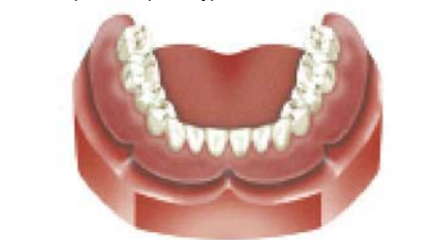

11. Абатмънтите *Locator* трябва да се затегнат отново с минимум 20 Ncm въртящ момент. Ето пълната конструкция на място.

Забележка: Това ръководство е само за образователни цели.

Вижте указанията за употреба пълни указания относно употребата на този продукт.

Формуляр за поръчка на свързващ елемент на сменяема протеза Locator®

Абатмънти Locator

Кол.	Система имплантати Tapered Screw-Vent®	
	Диам. на платф.	Дълж. на манш.
	TLOC3/0	3.5mm 0mm
	TLOC3/1	3.5mm 1mm
	TLOC3/2	3.5mm 2mm
	TLOC3/3	3.5mm 3mm
	TLOC3/4	3.5mm 4mm
	TLOC3/5	3.5mm 5mm
	TLOC3/6	3.5mm 6mm
	TLOC4/0	4.5mm 0mm
	TLOC4/1	4.5mm 1mm
	TLOC4/2	4.5mm 2mm
	TLOC4/3	4.5mm 3mm
	TLOC4/4	4.5mm 4mm
	TLOC4/5	4.5mm 5mm
	TLOC4/6	4.5mm 6mm
	TLOC5/1	5.7mm 1mm
	TLOC5/2	5.7mm 2mm
	TLOC5/3	5.7mm 3mm
	TLOC5/4	5.7mm 4mm

Кол.	Система имплантати AdVent®	
	Диам. на платф.	Дълж. на манш.
	AVLOC4/1	4.5mm 0.7mm
	AVLOC4/2	4.5mm 2mm
	AVLOC4/3	4.5mm 3mm
	AVLOC4/4	4.5mm 4mm
	AVLOC4/5	4.5mm 5mm
	AVLOC4/6	4.5mm 6mm

Кол.	Система имплантати SwissPlus®	
	Диам. на платф.	Дълж. на манш.
	OPLOC3/1	3.8mm 1mm
	OPLOC3/2	3.8mm 2mm
	OPLOC3/3	3.8mm 3mm
	OPLOC3/4	3.8mm 4mm
	OPLOC4/1	4.8mm 1mm
	OPLOC4/2	4.8mm 2mm
	OPLOC4/3	4.8mm 3mm
	OPLOC4/4	4.8mm 4mm

Абатмънти Locator

Кол.	Система имплантати Spline®	
	Диам. на платф.	Дълж. на манш.
	SLOC3/1	3.25mm 1mm
	SLOC3/2	3.25mm 2mm
	SLOC3/3	3.25mm 3mm
	SLOC3/4	3.25mm 4mm
	SLOC3/5	3.25mm 5mm
	SLOC4/1	4.0mm 1mm
	SLOC4/2	4.0mm 2mm
	SLOC4/3	4.0mm 3mm
	SLOC4/4	4.0mm 4mm
	SLOC4/5	4.0mm 5mm
	SLOC5/1	5.0mm 0.86mm
	SLOC5/2	5.0mm 2mm
	SLOC5/3	5.0mm 3mm
	SLOC5/4	5.0mm 4mm
	SLOC5/5	5.0mm 5mm

Аналози на абатмънтите

Кол.	Описание
	Диаметър на тялото
	LOCAN/4 4.0mm (4 в пакет)
	LOCAN/5 5.0mm (4 в пакет) (за 4.8mmD SwissPlus и 5.0mmD Spline)

Спомагателни компоненти

Кол.	Описание
	LOCMP2 <i>Locator</i> Мъжки елемент за обработка Опаковка (2 в пакет)
	LOCMP10 <i>Locator</i> Мъжки елемент за обработка (10 в пак)
	LOCIMP <i>Locator</i> отпечатъчно кепе (4 в пакет)

За пълния списък на продуктите и инструментите, моля вижте актуалния продуктов каталог.

Спомагателни компоненти

Кол.	Описание
	LOCRMW <i>Locator</i> зам. на мъжкия елем. станд. фиксиране Прозрачен (4 в пакет)
	LOCRMP <i>Locator</i> зам. на мъжкия елем. Леко фиксиране, Розов (4 в пакет)
	LOCRMB <i>Locator</i> зам. на мъжкия елем. Много леко фикс. Син (4 в пакет)
	LOCRMG <i>Locator</i> разширен обхват зам. на мъжкия елем., Зелен (4 в пакет)
	LOCRMR <i>Locator</i> много лек, разш. обхват, зам. на мъжкия елем., Червен (4 в пакет)
	LOCPP <i>Locator</i> паралелен пост
	LOCCT2 3-Пиес <i>Locator</i> Основен елем (Инстр. за отстр. и за пост. на мъжкия елем. и водач за абатмънта)
	LOCCTR Основен инструмент Накрайник за замяна
	LOCW15 <i>Locator</i> динам. ключ Вод. за пост., 15mmL
	LOCW21 <i>Locator</i> динам. ключ Вод. за пост., 21mmL
	TW30 Протетичен динамометричен ключ 30 Ncm
	TW20 Протетичен динамометричен ключ 20 Ncm
	TW1.25 Динам. ключ Водач за поставяне 1.25mmD
	TW1.25L Дълъг динам. ключ Вод. за пост. 1.25mmD
	LOCMDL <i>Locator</i> модел

За въпроси и поръчки по факса:

В САЩ 800 854 7019
Факс 888 225 2483

Извън САЩ +1 760 929 4300
Факс +1 760 431 7811

Австралия +61 (0)2 9950 5444
или 1 800 241 916
Факс +61 (0)2 9975 3594

Канада +1 905 567 2073
или 1 800 265 0968
Факс +1 905 567 2076

Франция +33 (0)1 45 12 35 35
Факс +33 (0)1 45 60 04 88

Германия +49 (0)761 4584 722/723
Факс +49 (0)761 4584 709

Израел +972 (0)3 6124242
Факс +972 (0)3 6124243

Испания +34 93 846 05 43
Факс +34 93 845 43 25

www.zimmerdental.com

Доставка с Federal Express

2-дни на следващия работен ден (17:30) P1 (10:30 am)

Трябва да пристигне до _____

Варианти за плащане

Фактура Плащане при доставка
 Visa Mastercard A m E x

Кредитна карта № _____

Срок на годност _____

Подпис _____

Банкова сметка на клиента _____

Получател: Д-р Име _____

Телефон (_) _____

Адрес _____

Град _____

Щат _____ Пощенски код _____

Дата на поръчката _____

Поръчано от _____