

Hex-Lock™ Възстановяване с контурен абатмънт



1. Махнете оздравителната надстройка от имплантата, като използвате 1,25mmD (0,050") шестограм.



2. Поставете контурния абатмънт Hex-Lock върху имплантата. Късата страна на маншета трябва да бъде ориентирана букално. Затегнете винта до 30 Ncm с калибриран динамометричен ключ за протезиране. Проверете с рентгенография дали абатмънтът е прилегал плътно.



3. Поставете капачето за вземане на отпечатък върху абатмънта, като се уверите, че капачето е изравнено с контурите на маргиналният участък. Капачето трябва да щракне на мястото си. Ако са необходими изменения на абатмънта, вземете отпечатък на неизменения абатмънт, преди да бъдат направени изменения. След това съобщете за измененията в лабораторията.




4. Поставете със спринцовка отпечатъчен материал около капачето за вземане на отпечатък и вземете отпечатък с цяла лъжица. Капачето ще остане в отпечатъка.




5. Изравнете аналога на контурния абатмънт с капачето за вземане на отпечатък и го поставете в отпечатъка. Напаснете аналога в капачето за вземане на отпечатък.



6. Подготовете временната корона чрез нанасяне на пластмаса върху временното кепе или го използвайте самостоятелно. Запълнете канала на винта и циментируйте короната или кепето на място, като използвате временен цимент.

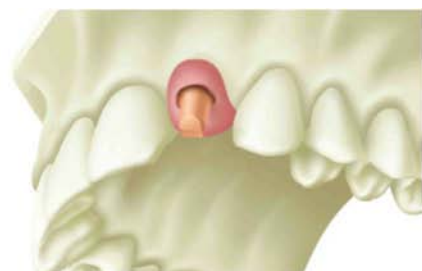

7. В лабораторията отлейте отпечатъка, като използвате мекотъкнен материал за представяне на гингивалните тъкани.

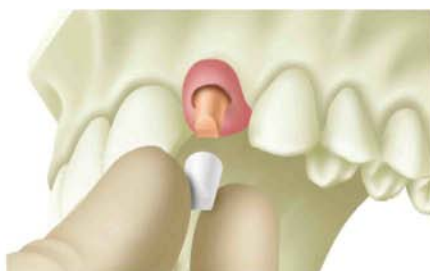

8. Поставете контурираното восьъчно кепе върху аналога на абатмънта в отпечатъка. Кепето не обхваща абатмънта.



9. Уплътнете маргиналните участъци на восьъчното кепе. Направете восьъчен модел и излейте кепето, като използвате стандартни техники за зъбопротезиране.



10. За да завършите конструкцията, нанесете порцелан върху отливката.



11. Махнете временната корона. Изчистете останалия цимент. Запълнете канала на винта. Циментируйте окончателната корона.



12. Завършената конструкция на място.

Забележка: Това ръководство е само за образователни цели.

Вижте указанията за употреба Zimmer Dental Prosthetic (#4894) и Zimmer® Hex-Lock Contour Abutment System (#5896) за пълни указания за тези продукти.

Формуляр за поръчка на Tapered Screw-Vent® и Screw-Vent® Prosthetics



Кол.	Абатменти Hex-LockContour			
	Диам. на платф.	ГП	Височ. манш.	
	ZOA341S	3.5mm	4.5mm	1mm
	ZOA342S	3.5mm	4.5mm	2mm
	ZOA343S	3.5mm	4.5mm	3mm
	ZOA441S	4.5mm	4.5mm	1mm
	ZOA442S	4.5mm	4.5mm	2mm
	ZOA443S	4.5mm	4.5mm	3mm
	ZOA451S	4.5mm	5.5mm	1mm
	ZOA452S	4.5mm	5.5mm	2mm
	ZOA453S	4.5mm	5.5mm	3mm
	ZOA561S	5.7mm	6.5mm	1mm
	ZOA562S	5.7mm	6.5mm	2mm
	ZOA563S	5.7mm	6.5mm	3mm



Кол.	Абатменти Hex-LockContour			
	Диам. на платф.	ГП	Височ. манш.	
	ZOA341A	3.5mm	4.5mm	1mm
	ZOA342A	3.5mm	4.5mm	2mm
	ZOA441A	4.5mm	4.5mm	1mm
	ZOA442A	4.5mm	4.5mm	2mm
	ZOA451A	4.5mm	5.5mm	1mm
	ZOA452A	4.5mm	5.5mm	2mm
	ZOA561A	5.7mm	6.5mm	1mm
	ZOA562A	5.7mm	6.5mm	2mm

Кол.	Комплект медали на конт. абатменти
ZOATKIT	Включва модели за платформи 3.5mm, 4.5mm и 5.7mm, прави и огънати



Кол.	Модели на контурни абатменти		
	Диам. на платф.	Диаметър на гингив. профил	
	ZOAT34	3.5mm	4.5mm
	ZOAT45	4.5mm	5.5mm
	ZOAT56	5.7mm	6.5mm



Кол.	Конт. възст. комплекти, включват отпечатъчно капаче, аналог, восьъчно кепе и временно кепе		
	Диаметър на гингив. профил		
	ZORKIT3S	3.5mm	Прав
	ZORKIT4S	4.5mm	Прав
	ZORKIT5S	5.5mm	Прав
	ZORKIT6S	6.5mm	Прав
	ZORKIT4A	4.5mm	Огънат
	ZORKIT5A	5.5mm	Огънат
	ZORKIT6A	6.5mm	Огънат



Кол.	Контурни отпечатъчни капачета		
	Диаметър на гингив. профил		
	ZOCIMP3S	3.5mm	Прав
	ZOCIMP4S	4.5mm	Прав
	ZOCIMP5S	5.5mm	Прав
	ZOCIMP6S	6.5mm	Прав
	ZOCIMP4A	4.5mm	Огънат
	ZOCIMP5A	5.5mm	Огънат
	ZOCIMP6A	6.5mm	Огънат



Кол.	Контурни временни кепета		
	Диаметър на гингив. профил		
	ZOCPROV3S	3.5mm	Прав
	ZOCPROV4S	4.5mm	Прав
	ZOCPROV5S	5.5mm	Прав
	ZOCPROV6S	6.5mm	Прав
	ZOCPROV4A	4.5mm	Огънат
	ZOCPROV5A	5.5mm	Огънат
	ZOCPROV6A	6.5mm	Огънат



Кол.	Аналози на контурни абатменти		
	Диаметър на гингив. профил		
	ZOANA3S	3.5mm	Прав
	ZOANA4S	4.5mm	Прав
	ZOANA5S	5.5mm	Прав
	ZOANA6S	6.5mm	Прав
	ZOANA4A	4.5mm	Огънат
	ZOANA5A	5.5mm	Огънат
	ZOANA6A	6.5mm	Огънат



Кол.	Контурни восьъчни кепета		
	Диаметър на гингив. профил		
	ZOCWAX3S	3.5mm	Прав
	ZOCWAX4S	4.5mm	Прав
	ZOCWAX5S	5.5mm	Прав
	ZOCWAX6S	6.5mm	Прав
	ZOCWAX4A	4.5mm	Огънат
	ZOCWAX5A	5.5mm	Огънат
	ZOCWAX6A	6.5mm	Огънат

Забележка: Компонентите трябва да съответстват на гингивалния профил на абатмента. Капачета и кепета с 3,5 мм гингивален профил са само за едноставите импланти Zimmer One-Piece..

За пълен списък на продуктите и инструментите, моля, вижте актуалния продуктов каталог.

Цветна кодировка за контурираните капачета за вземане на отпечатък и аналози на контурните абатменти.

Цвет	Диаметър на гингивалния профил
Светло син	3.5mm
Телесен	4.5mm
Розов	5.5mm
Жълт	6.5mm

www.zimmerdental.com

Банкова сметка на клиента _____

Получател: Д-р Име _____

Телефон (____) _____

Адрес _____

Град _____

Щат _____ Пощенски код _____

Доставка с:

2-дни на след. работен ден (5:30 pm) P1 (10:30 am)

Трябва да пристигне до _____

Варианти за плащане

Фактура Плащане при доставка

Visa Mastercard A m E x

Кредитна карта № _____

Срок на годност _____

Подпис _____

