



One Abutment -  
One Time™  
(Един абатмънт –  
Един път)



Нова концепция за терапия -  
проста, иновативна, лесна за изпълнение.

## Нещо толкова просто, което прави толкова много.

Какво прави *One Abutment - One Time* (Един абатмънт – еднократно) фаворит сред лекарите и пациентите? Просто казано, от своята лекота на изпълнение до спестяващото времето удобство, никое друго решение с абатмънт не прави толкова много, за толкова хора, толкова добре.



### Ползи

#### Окончателният абатмънт се поставя само веднъж.

Връзката с фрикционно поставяне осигурява висока степен на стабилност на абатмънта от самото начало, като на практика премахва микродвиженията<sup>1</sup>.

Окончателният абатмънт се поставя веднага, без да е необходима допълнителна подготвителна работа.

#### Защитава меката тъкан.

По-добро решение за Вашите пациенти - незабавното възстановяване предпазва тъканите. Първоначалните гингивални връзки на абатмънта вече не се унищожават поради многократно поставяне и махане на абатмънтите и оздравителните абатмънти, което също спомага да се сведе до минимум потенциалната загуба на кост.

#### Спестява време и пари.

Поставянето на конвенционални оздравителни абатмънти и последващите визити за вземане на отпечатък вече не са необходими. Предварително изработените протезни компоненти спестяват време и пари в кабинета и лабораторията.

#### По-малко посещения за Вашите пациенти.

Конвенционално: 4-5 посещения  
*Един абатмънт – Еднократно*: 2-3 посещения

(Няма посещения за поставяне на оздравителни абатмънти и вземане на отпечатък)

*Един абатмънт - еднократно*

Конвенционални

0 1 2 3 4 5  
Посещения

#### Получавате нови препоръки.

Простата концепция за терапия позволява на зъболекаря, извършващ възстановяването да прави временни и окончателни конструкции без никакви допълнителни инструменти или инвестиции. Последващото протетично лечение е сходно с това при конвенционалните техники за корони и мостове.

<sup>1</sup> Binon PP. The evolution and evaluation of two interference-fit implant interfaces. *Postgraduate Dent.* 1996;3:3-13.

# Една концепция за терапия, четирима победители.

1



Първоначално състояние след поставянето на имплантата и оздравителната фаза.

2



Разкрийте и отстранете хирургическия покривен винт.

3



Определете точната височина на абатмънта, като използвате пробни контурните надстройки, които могат да се рестерилизират.

4



Поставете контурен абатмънт Nex-Lock® върху имплантата. Късата страна на втулката трябва да бъде разположена лабиално или букално. Използвайте калибриран динамометричен ключ и затегнете винта на абатмънта до 30 Ncm. Направете рентгенова снимка, за да потвърдите, че абатмънтът е напълно прилегал.

5



Поставете контурираното капаче за вземане на отпечатък върху абатмънта, като се уверите, че капачето е изравнено с контурите на маргиналният участък. Капачето трябва да щракне на мястото си.

6



Инжектирайте отпечатъчния материал около контурираното капаче за вземане на отпечатък и вземете отпечатък пълна дъга. Капачето ще остане в отпечатъка.

7



Подгответе временната корона чрез нанасяне на акрил към контурното временно кепе (или го използвайте самостоятелно). Запълнете канала на винта и използвайте временен цимент, за да циментирате короната или контурно временно кепе.

# Един абатмънт – Еднократно.

## Дентална лаборатория



1

Изравнете аналога на контурния абатмънт с контурираното капаче за вземане на отпечатък и го поставете върху отпечатъка, като аналогът трябва да щракне на място.



2

В лабораторията излейте отпечатъка с матрица. Използвайте мекотъканин материал за представяне на гингивалните контури.



3

Поставете контурираното восъчно кепе върху аналога на контурния абатмънт в мастер отливката. Кепето не пасва върху аналога.



4

Използвайте стандартни техники за протезиране, за да моделирате от восък и излеете кепето.



5

Нанесете керамична облицовка върху отливката, за да довършите възстановяването.



6

Поставете окончателната корона върху мастер отливката.



## Пациент



Махнете временната корона и останалия цимент.  
Запълнете канала на винта и циментируйте окончателната корона.



Окончателната конструкция на място.



За повече информация за нашите продукти и възможности за обучение, свържете се с нас: ф-ма Вилем +359884 278484

За да получавате нашите електронни новини, посетете ни на [http://www.zimmerdental.com/news\\_eNewsletterSignUp.aspx](http://www.zimmerdental.com/news_eNewsletterSignUp.aspx)



[www.zimmerdental.com](http://www.zimmerdental.com)